

ボーンマロウコレクションキット

Bone Marrow Collection Kit

採取骨髄液の細菌汚染の低減化に！
採取骨髄液のろ過時間の短縮に！



ボーンマロウコレクションキット (型式：4R2107J)

キット内容

①	コレクションコンテナ	1200mL (850 μ フィルター内蔵)	1 個
②	ろ過フィルター	500 μ	2 個
③	ろ過フィルター	200 μ	1 個
④	トランスファーパック	600mL	3 個
⑤	トランスファーパック	2000mL	1 個
⑥	チッププロテクター		4 個


エチレンオキサイド滅菌済 (使用 1 回限り)
販売名：ボーンマロウコレクションキット
医療機器承認番号：20500BZY00152000
JAN コード：4580167169353
定価：¥31,250-(税別)

別売製品

ボーンマロウコレクションスタンド (型式：4R2105)

ボーンマロウコレクションキット使用時の専用スタンド

※ 本品は未滅菌品です。使用毎に滅菌してからご使用下さい。
本品は医療機器ではありません。
JAN コード：4580167169346
定価：¥65,000-(税別)

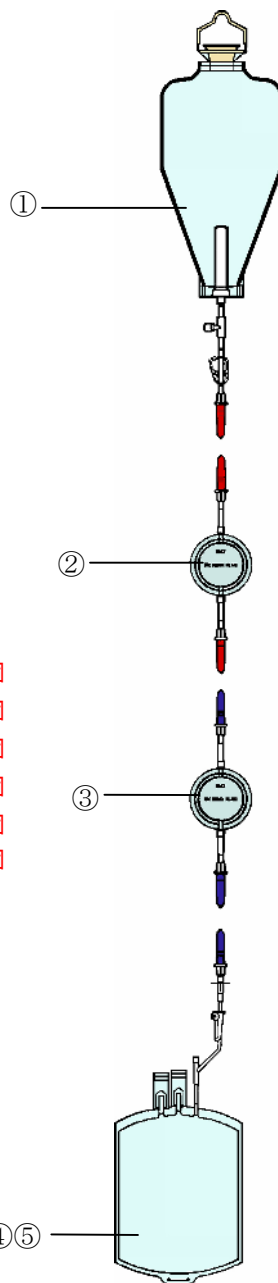

製造販売元



株式会社パルメディカル
東京都千代田区岩本町三丁目 9 番 1 7 号
TEL 03-5821-0607 FAX 03-5821-9980 <http://www.palmedical.co.jp/>
支店：札幌 広島 営業所：帯広 仙台 大阪 福岡 工場：群馬

製造元



Fenwal[®] フェンウォール社
Blood Technologies
<http://www.fenwalinc.com/>

ボーンマロウコレクションキット

Bone Marrow Collection Kit

採取骨髄液のろ過をシンプルに！

ボーンマロウコレクションキットの概要

ボーンマロウコレクションキットは、コレクションコンテナ、トランスファーバック、及びフィルターからなる骨髄採取キットです。

コレクションコンテナに入れた骨髄液は重力によりコレクションコンテナからトランスファーバックに入ります。

フィルターはコレクションコンテナ内(850 μ)にあるプレフィルターとインラインフィルター(500 μ /200 μ)の3種類からなり、骨髄液中の脂肪塊、骨片などを除去します。



ボーンマロウコレクションキットの特徴

- ・ろ過による細胞のロスはありません。※1
- ・シアトル方式に比較し、細菌による汚染の頻度を低下させることが出来ます。※2
- ・ろ過速度は約100 mL/分です。※1
- ・ディスポーザブルキット(使用1回限り)のため、使用後の処理が容易です。

※1 R. Kandler et al: The 45th Annual Meeting of American Association of Blood Banks November 7-12, 1992, San Francisco.

※2 K. G. Schepers et al: D. A. Worthigton-White, A. P. Gee, S. Gross (eds): Advances in Bone Marrow Purging and Processing, Wiley-Liss, New York, 1992, pp 379-384

製造販売元



株式会社パルメディカル

東京都千代田区岩本町三丁目9番17号

TEL 03-5821-0607 FAX 03-5821-9980 <http://www.palmedical.co.jp/>

支店/営業所: 札幌 広島 帯広 仙台 大阪 福岡 工場: 群馬

製造元



フェンウォール社

<http://www.fenwalinc.com/>