

LINEUP



喉頭鏡ハンドル

製品名	使用電池	数 量	規 格
スタンダードタイプ	電池単2×2	1 本	692.01
ショートタイプ	電池単3×2	1 本	692.02
スリムタイプ	電池単3×2	1 本	692.03

※使用電池は別途必要になります。




マッキントッシュブレード

(EOG 滅菌済)

製品名	数 量	規 格	全 長
NO.2	1箱 (5個入)	691.02	107mm
NO.3	1箱 (5個入)	691.03	140mm
NO.4	1箱 (5個入)	691.04	157mm

※本製品はディスポーザブルです。

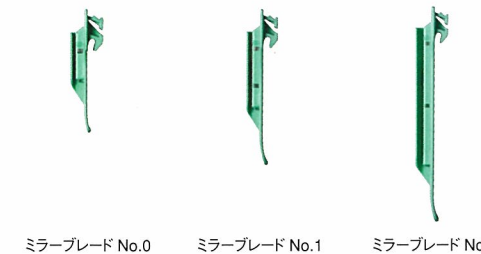

ミラーブレード

(EOG 滅菌済)

製品名	数 量	規 格	全 長
NO.0	1箱 (5個入)	691.10	78mm
NO.1	1箱 (5個入)	691.11	105mm
NO.2	1箱 (5個入)	691.12	155mm

※本製品はディスポーザブルです。



キセノン電球

製品名	数 量	規 格
キセノンバルブ	1個入	692.81



製造販売元

株式会社パルメディカル
http://www.palmedical.co.jp/

支店：札幌 営業所：福岡 広島 大阪 帯広 仙台 工場：群馬


販売名：ディスポーザブル喉頭鏡セーフスコープ
医療機器届出番号：13B1X00065000005

101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル6F
Telephone 03-5821-0607 Facsimile 03-5821-9980

製造元



株式会社パルメディカル

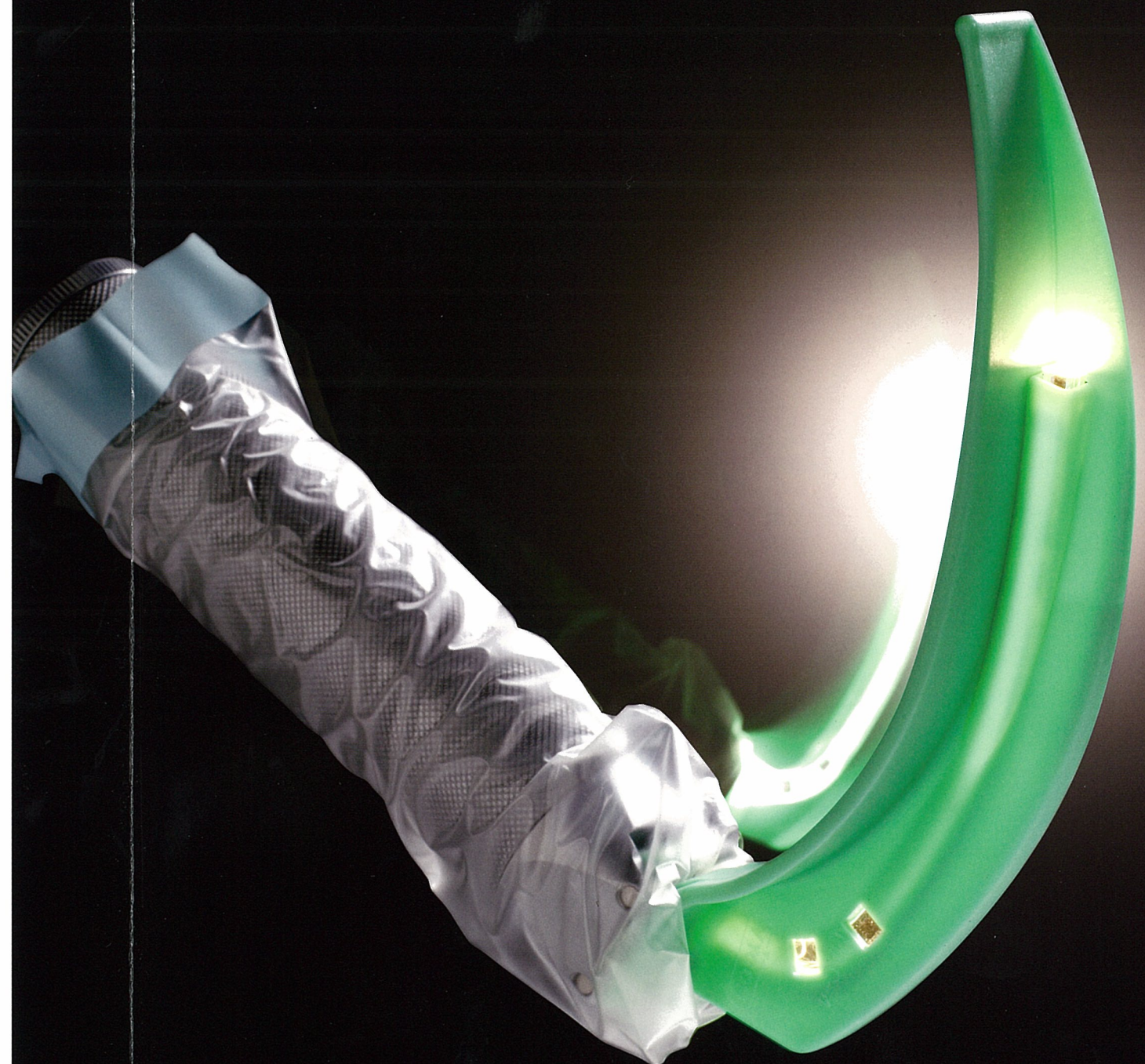

VYGON 感染予防 ディスポーザブル喉頭鏡

SAFE SCOPE

丈夫で 明るく 人にやさしい

SAFESCOPE

喉頭鏡もディスポーザブルの時代 日本初、保護カバーで交差感染を防止

保護カバー付ブレード（特許取得）

多くの国で、高い操作性に加えて衛生性が強く求められてきている喉頭鏡。その変化と要望に答えてフランスVYGON社により開発された保護カバー付喉頭鏡を日本で発売。この保護カバーシステムはVYGON社の特許です。



キセノン電球の明るい輝き

ハンドルから放つキセノン電球の光は、ブレードにセットされたオプティックファイバーに沿って明るい輝きを全体に放ちます。



丈夫でなめらかなブレード

ポリアミド製のブレードは金属同様の十分な強度を保ちます。なめらかな角度の刃先は、挿管手技中の喉頭部損傷の可能性をより小さくしました。



交差感染防止

○ディスポーザブルブレード
患者さんの粘膜に直接接触するブレード部は完全ディスポ。患者間での交差感染を確実に防ぎます。



○完全防水ハンドル

ブレードについている保護カバーがハンドル全体を保護するのでハンドルに血液・体液が付着する事ありません。付着した場合でもハンドルは完全防水なので丸洗い・漬け置きによる消毒が可能です。



経費削減

セーフスコープは滅菌・消毒などにかかる時間・経費を節約できます。また、万が一、交差感染による院内感染が発生した場合、その対策費用は莫大なものになります。シングルユーズによる確実な感染対策は、そのリスク管理に大いに貢献します。

保護カバーシステム

1 ブレードの取り付け



保護カバーが付いたまま、ディスポブレードをハンドルに確実に取り付けてください。（ランプが点灯するまで）

2 ハンドルの保護



保護カバーを移動させハンドルを覆います。

3 使用後のブレード



使用後、保護カバーをディスポブレードに戻してください。

4 ブレードの廃棄



カバーで覆ったディスポブレードをハンドルから取り外し、貴院基準を基に廃棄してください。