

## 除菌ワイプをご使用にあたってのご注意

### ■ご使用上の注意

- ・手荒れ防止のため、ご使用の際はグローブを着用してください。
- ・人体には使用しないでください。
- ・万一、目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。痛みなどの異常が残る場合は眼科医の相談を受けて下さい。
- ・水に溶けないため、トイレには流さないで下さい。
- ・乾燥を防ぐため、ご使用後は上蓋をきちんと閉めてください。開封後はできるだけ早めにご使用ください。
- ・機器などに使用の際は、機器付属の「取扱説明書」を確認してから使用してください。
- ・塗料など塗ったもの、印刷面、樹脂製品白木等に使用すると変色・変質する恐れがありますので、目立たない場所で確かめてからご使用ください。
- ・スチロール製品、革製品、ウール製品には使用しないでください。
- ・除菌とは硬質表面の菌を減少させることをいい、全ての菌を除去するものではありません。

### ■保管上の注意

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- ・開封後はほこりやゴミなどが入らないように清潔に保管してください。

2021年1月

株式会社パルメディカル