





パル輸液セット 製品ラインアップ

	型式	入数	共通商品コード (JAN)	フィルター	側管	製品写真
ダブルタイプ	PIC-0CE-900	15	4580167162330	—	—	 PIC-0CE-900
	PIC-1CE-901	15	4580167162347	—	●	
	PFC-0CE-902	15	4580167162354	●	—	
	PFC-1CE-903	15	4580167162361	●	●	
シングルタイプ	PIC-0CE-904	15	4580167162378	—	—	 PIC-0CE-904
	PIC-1CE-905	15	4580167162385	—	●	
	PFC-0CE-907	15	4580167162408	●	—	
びん針 接続セット	PAC-01E	50	4580167164204	/	/	 PAC-03E
	PAC-03E	20	4580167164228			
バッグスパイク	PBC-50E	50	4580167164150	/	/	

一般の名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
 一般の名称：輸液用連結管
 一般の名称：調整用薬液注入コネクタ

販売名：パル輸液セット
 販売名：パルびん針接続セット
 販売名：パルバッグスパイク

医療機器認証番号：218AIBZX00062000
 医療機器届出番号：13B1X00065000027
 医療機器届出番号：13B1X00065000017

- ≡ 安全・安心の国内生産
- ≡ 豊富なラインアップ
- ≡ 高い密閉性



EQ JASHIELD®

安全な抗がん剤投与を実現する輸液システム

パル輸液セット

■ 製造販売業者
株式会社パルメディカル

〒135-0014
 東京都江東区石島 2-14 Imas Riverside 3F-C
 TEL 03-6458-6845 FAX 03-6458-6574
<https://www.palmedical.co.jp/>

■ 支店：広島 札幌 ■ 営業所：福岡 大阪 帯広 ■ 工場：群馬
 (商品に関する問い合わせ：TEL 03-6458-6847)

取扱店

pal
 MEDICAL

パル輸液セット

輸液セット



つなぎ替え部品にエクアシールドメスルアーロックコネクタを使用しています。

びん針接続セット



輸液セットびん針に接続する事で他社輸液セットの使用が可能になります。


バッグスパイク




エクアシールドメスルアーロックコネクタが直接接続できます。

使用手順例

ダブルタイプ

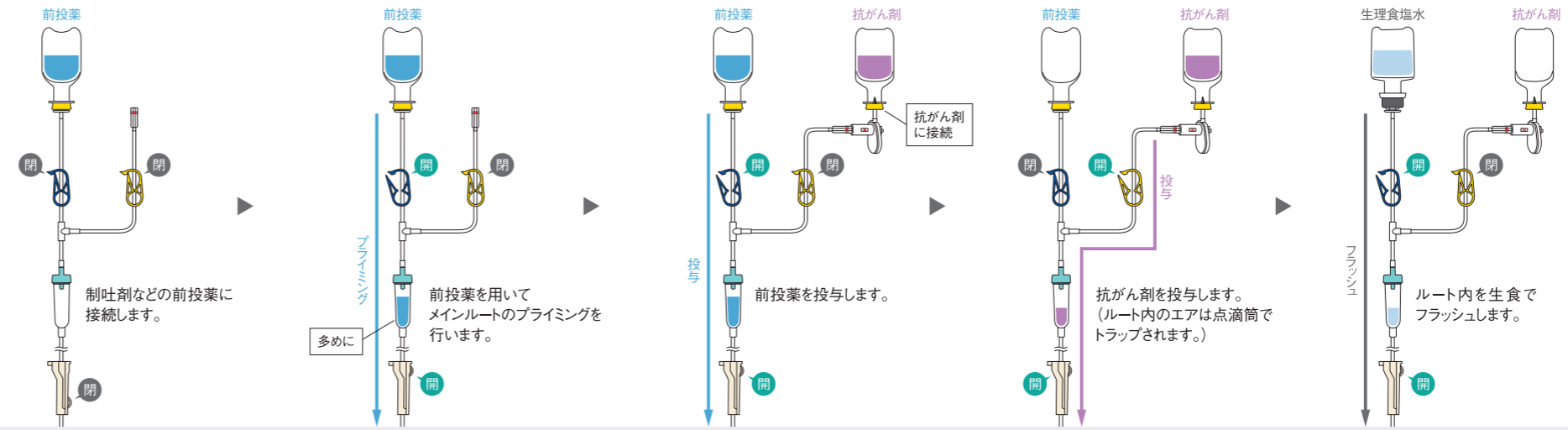


シングルタイプ

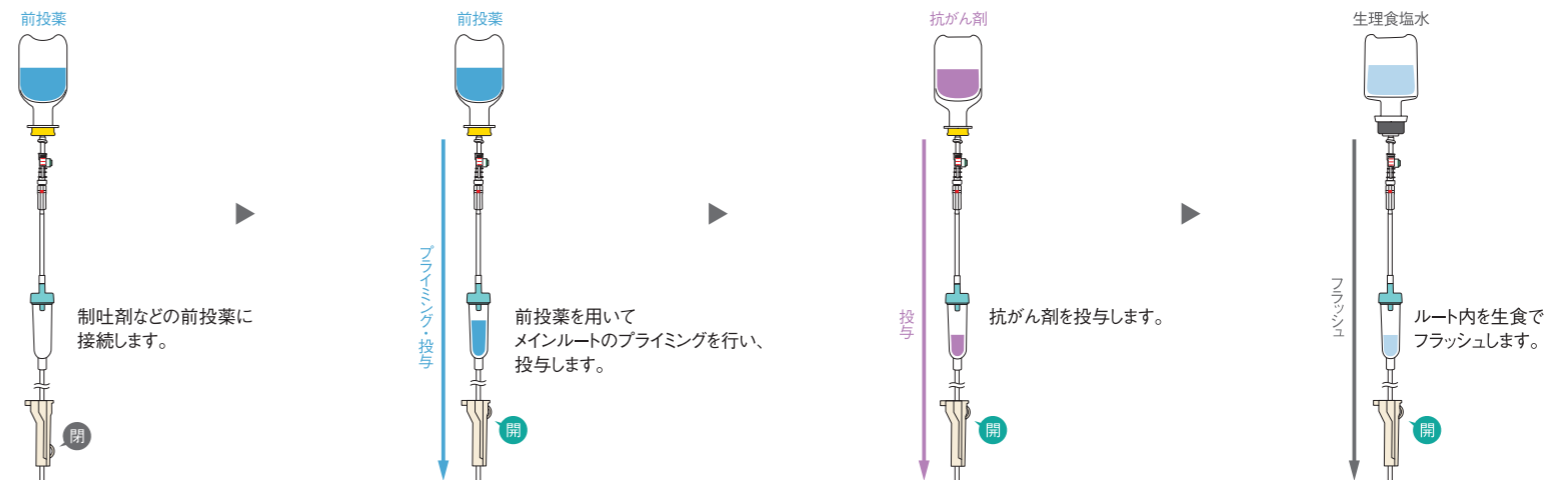


わかりやすく 簡単な接続機構

アダプタやコネクタは、赤色のマークを合わせるだけで確実に接続できます。

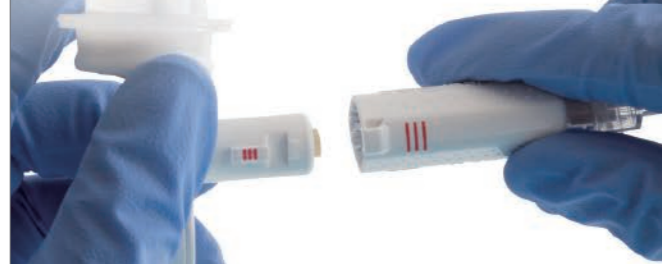


接続面は メンブレン構造

メンブレン構造の高い密閉性により薬剤漏れを防止します。

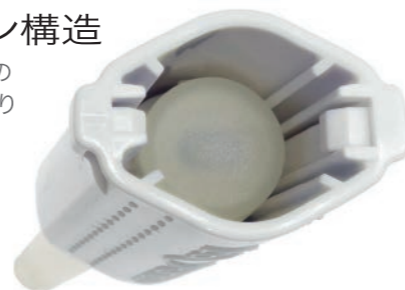

びん針接続方法

- ① びん針接続セットに輸液セットのびん針を挿入して接続します。
- ② びん針の根元までしっかりと差し込んでください。

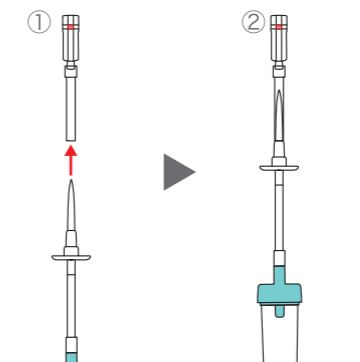

エクアシールドスパイクアダプタにも接続可能です。

エクアシールドスパイクアダプタ

輸液バッグから溶解液の抜き取り、および薬液の注入作業の際に使用。

