


ケモカバー®

抗がん剤専用ジッパー付きプラスチックバッグ

【U字穴を使って吊るす場合 パターンA】 (あらかじめ輸液セットが接続された輸液バッグの運搬・廃棄)


各 部 名 称

U字穴側

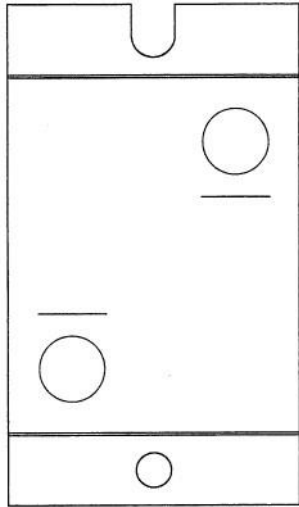


○穴側


- ① 下記のようにつまみ、U字穴側のジッパーを開いてください。

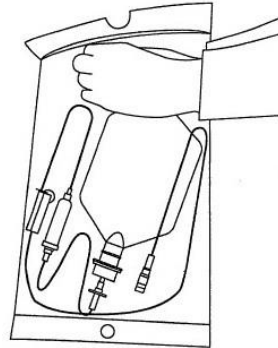


- ② 輸液バッグの吊り手を U字穴側から出して、輸液スタンドに吊り下げてください。

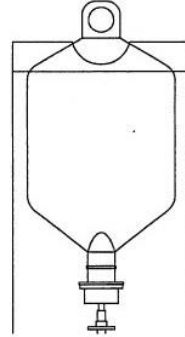

- ③ ○穴側のジッパーを開いて輸液セットを取り出し、患者につなぎ投与してください。

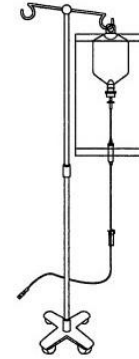


- ④ 投与完了後は U字穴側、○穴側両方のジッパーを閉じて廃棄してください。

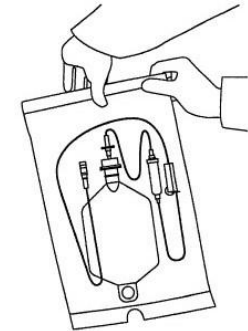

【U字穴を使って吊るす場合 パターンB】 (輸液バッグの運搬・切り離し・廃棄)


- ① 下記のようにつまみ、U字穴側のジッパーを開いてください。

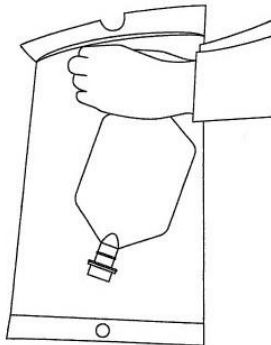


- ② ○穴側のジッパーを開け、ケモカバーの上からゴム栓を持ち、輸液セットを接続してください。



- ③ 輸液バッグの吊り手を輸液スタンドに吊り下げて投与してください。

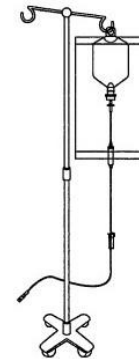


- ④ 投与完了後は U字穴側、○穴側両方のジッパーを閉じて廃棄してください。

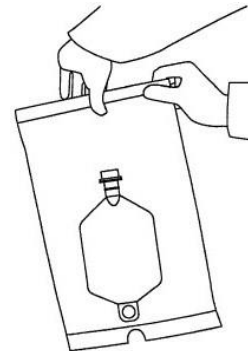

【○穴を使って吊るす場合】（輸液バッグの運搬・切り離し・廃棄）


① 下記のようにつまみ、U字穴側のジッパーを開いてください。

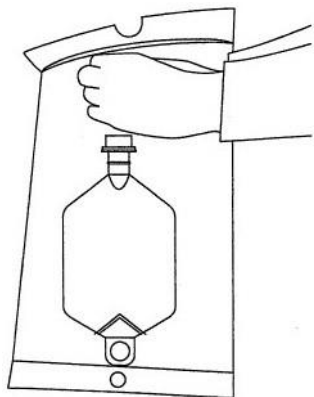


② U字穴側からゴム栓部を出し輸液セットを接続してください。（接続時はケモカバーの上からゴム栓を持ってください。）



③ ○穴を輸液スタンドに吊り下げて投与してください。

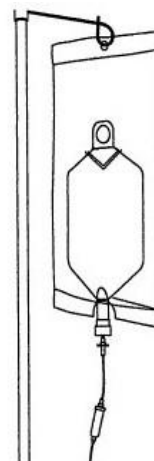


④ 投与完了後はU字穴側、○穴側両方のジッパーを閉じて廃棄してください。

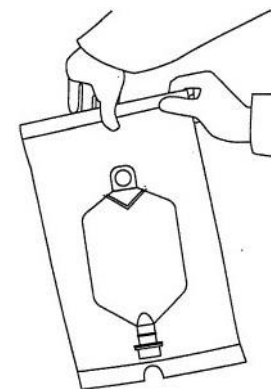

各 部 名 称

U字穴側

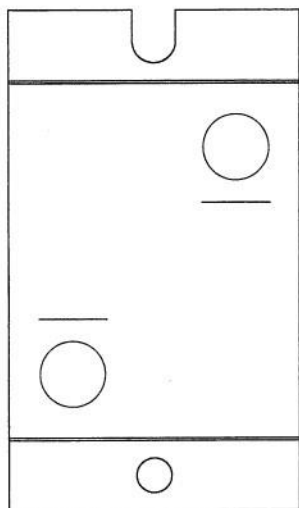

○穴側

■ 取り扱いについては貴院で設定したガイドラインに従って行ってください。



株式会社パルメディカル

〒135-0014
東京都江東区石島 2-14 Imas Riverside 3F-C
TEL 03-6458-6845 FAX 03-6458-6574
<https://www.palmedical.co.jp/>



■支店：広島 札幌 ■営業所：福岡 大阪 帯広 ■工場：群馬
(商品に関する問い合わせ：TEL 03-6458-6847)