

曝露対策

ケモカバーから
輸液バッグを取り出さずに
投与・廃棄ができます。



抗がん剤専用ジッパー付きプラスチックバッグ

ケモカバー®

■ 製品の特長



輸液バッグのフックをそのまま活用

直接輸液バッグのフックを使えるので安心・安全な設計です。

識別しやすいイラストのマーク

スタッフが識別しやすく、患者さんにも不安感を与えません。

豊富な製品バリエーション

サイズはS・M・Lサイズ、Mサイズには遮光タイプもご用意しております。



■ 製品性能

ケモカバーによる曝露予防効果の検証結果


ケモカバーに入れた調製後の輸液バッグ全面からは、抗がん剤が検出されましたが、ケモカバーの外側からは抗がん剤は認められませんでした。

～日本臨床腫瘍学会学術大会 2019 日本医科大学武蔵小杉病院示説発表より～

サンプル	輸液バッグ全面 (ng) (検出限界 1.2)	ケモカバー内面 (ng) (検出限界 3)	ケモカバー外面 (ng) (検出限界 6)
1	8670	3.33	ND
2	1450	27.7	ND
3	25100	24900	ND
4	1200	7.83	ND
5	21800	ND	ND
6	75.8	ND	ND



ケモカバー M遮光 紫外線透過率測定

200～1000nmの波長を測定し、200～500nmまではほぼ光の透過は確認されませんでした。

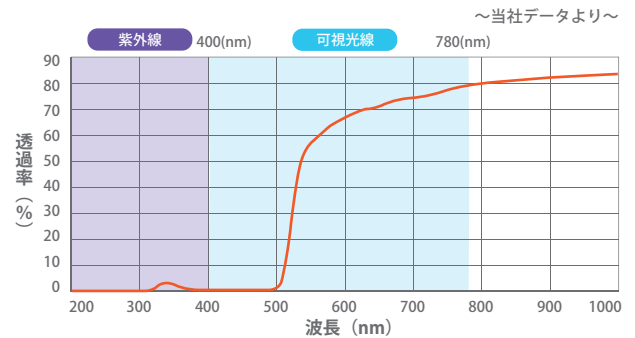

〈参考〉UV-B:280-315nm UV-A:315-400nm(気象庁 HP) (試験機関の測定結果報告書より抜粋)
※上記は実測値であり、保証値ではございません。

■ 使用イメージ

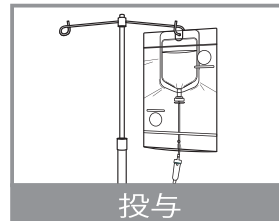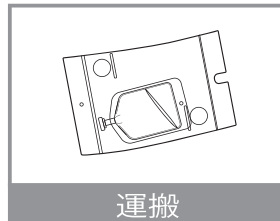

■ 製品ラインアップ

製品名	型式	サイズ (mm)	梱包単位	定価 (1パック) 税抜き	共通商品コード
ケモカバー S	CS-2	170×235	50 枚 / パック	¥ 2,850	4580167169919
ケモカバー M	CM-2	240×320		¥ 4,060	4580167169926
ケモカバー L	CL-2	240×430		¥ 4,870	4580167169933
ケモカバー M 遮光	CM-2B	240×320		¥ 6,470	4580167169964

総販売元

pal
MEDICAL

株式会社パルメディカル

〒135-0014 東京都江東区石島 2-14 Imas Riverside 3F-C

TEL 03-6458-6845 FAX 03-6458-6574

<https://www.palmedical.co.jp/>

■支店：広島 札幌 ■営業所：福岡 大阪 帯広 ■工場：群馬
(商品に関する問い合わせ：TEL 03-6458-6847)

取扱店