

## パルバッグスパイクの使用方法と注意事項

型式: PBC-10 / PBC-40

接続する器具の中に、コネクタを破損させる原因となる金属針がないか、必ず確認してから使用して下さい。

### 【例】 BDファシール遮封式輸液システム



- ⚠️ コネクタに直接接続するルアーロックコネクタに金属針はありませんが、ルアーロックコネクタに接続されるインジェクタには金属針が内蔵されています。この金属針が、ルアーロックコネクタ内を経由してコネクタに接触することで、コネクタに破損が生じるおそれがあります。
- ⚠️ 勝手な自己判断による誤使用を避けるため、使用する医療機器の電子添文等で接続可否を必ず確認してから使用することを徹底して下さい。

— 製品の使用施設での実例を元に作成。 —

#### ■お問い合わせ先

株式会社パルメディカル 〒135-0014 東京都江東区石島2番14号

■東京本社 TEL 03-6458-6845

■札幌支店 TEL 011-704-5528

■大阪営業所 TEL 06-6838-7703

■帯広営業所 TEL 0155-66-9445

■URL <https://www.palmedical.co.jp/>

■広島支店 TEL 082-230-2131

■福岡営業所 TEL 092-477-5866