

仕様



- ・販売名 : コールドベスト
- ・型式 : CV001
- ・共通商品コード : 4580167169971
- ・冷却媒体 : 尿素、塩化アンモニウム
- ・重量 : 4.3kg (キャリーバッグ包装時)
- ・使用期限 : 3年

給水方法

- ・ベストに水を充填する際、給水バッグがねじれていないことを確認すること。
- ・ベストには必ず規定量の3Lを注入すること。規定量より少ないと冷却効果が弱まる。また、多いと液漏れが生じる。
- ・規定量3Lの目安は、給水バッグ一杯に充填した量である。給水バッグの目盛りは海外仕様のものであり、正確性に欠けるので使用しないこと。
- ・注入する液体は、水を原則とすること。
- ・注入する水は、温水より冷水を推奨する。
- ・水が用意できない場合、炭酸を含まない液体を使用すること。アルコールや塩分濃度が高い液体(海水など)は使用しないこと。低い塩分濃度の液体(生理食塩水やスポーツドリンクなど)を使用する場合は注意すること。
- ・給水バッグに注入後、注入口の蓋がしっかり閉じているのを確認すること。
- ・ベストのメスコネクタは給水バッグのオスコネクタとしか接続できないので他の器具を接続しないこと。
- ・コネクタは音がするまでしっかりと挿入すること。
- ・ベストを傾けたり、揉んだり、振ったり、逆さまにしたりして、ベスト全体に水が均等に行き渡るようにすること。手で持ち上げて行か、地面に置いたままで行うこと。

装着方法

- ・患者が仰向けに寝ていることを確認すること。
- ・ベストは鋭利な破片のない清潔な地面に置くこと。
- ・患者への装着は、注水後速やかに行うこと。
- ・患者に装着する際は、皮膚に接触するようにし、最大限覆うようにすること。また、必ず患者の胸部に本品の裏地(白地)を密着させること。
- ・ベストの翼が脇の下に来るまで、ベストを患者の頭の方にスライドさせること。
- ・ベストを背中や腰など患者の下に敷いて荷重をかけないこと。
- ・本品は薄い衣服を通して冷却効果を発揮するが、素肌に装着すると最も効果的である。
- ・本品を患者から取り外すときは、皮膚を傷つけないように胴体から慎重に持ち上げること。
- ・連続使用期間は、冷却を維持できる最長の1時間までとする。

安全上の注意

- ・開封時は製品や包装(真空保護ラップ)、乾燥剤に破損、汚損がないか確認すること。破損等の異常が認められる場合は使用せず廃棄すること。開封後はすぐに使用すること。
- ・本品を使用する前に、患者の胴体から刺激物質が除去されているのを確認すること。貼り薬、塗り薬、皮膚クリームなどが使用されている場合は注意すること。
- ・本品は患者の胴体に装着して、自重で所定の位置に留まるように設計されているので、縛ったり固定したりしないこと。
- ・使用中は本品の破損、接続部の緩みや外れ及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・患者の体温は環境的要因やシヤリング等の影響を受けるため、適切にモニタリングし患者の状態に注意すること。
- ・皮膚が長時間にわたって低温に曝される可能性があるため、皮膚障害に注意して使用すること。皮膚の弱い患者や本品をすぐに取り外せない患者への使用には十分に注意すること。
- ・穴あきや液漏れがあった場合は、汚染場所を多量の真水で洗い流し、直ちに本品を廃棄すること。
- ・本品の冷却媒体が金属表面に漏れた可能性がわずかでもある場合、影響を受けた場所を多量の真水で洗い流し、適切な検査を実施すること。
- ・本品の冷却媒体が目に入った場合または皮膚に付いた場合は、直ちに多量の真水で洗い流し、速やかに医師の判断を仰ぐこと。


- ・本品の破損により散乱した冷却媒体は、直接素手で触ることなく回収し、多量の真水で希釈し廃棄すること。
- ・再使用禁止。
- ・下記の症状のある、または疑いのある患者には使用しないこと。
 - － 心停止後に意識障害(GCS)スコアが9以上。
 - － 低体温症。
 - － 外傷性心停止。
 - － 重度の低血圧(収縮期血圧 < 90 mmHg)。
 - － レイノー病(症候群)、他の血管痙攣性疾患
 - － 低体温により増悪する血液疾患(クリオグロブリン血症、鎌状赤血球症等)。
 - － 血管炎の兆候。
 - － 寒冷蕁麻疹。
 - － その他医師が不相当と判断した人。

保管上の注意

- ・はじめに次のものがそろっているか確認すること。
 - － コールドベスト
 - － 給水バッグ
 - － かんたんガイド
 - － 取扱説明書(本書)
- ・水濡れに注意し、火気や直射日光及び高温多湿な場所を避けて保管すること。
- ・温度5℃～45℃、相対湿度10～75%で保管すること。
- ・本品は、子供の手の届かないところに保管すること。
- ・本品を酸性、塩基性、その他の強力な酸化還元化学薬品付近やこれらの薬品が漏れるおそれのある場所に保管しないこと。バッテリーや漂白剤、その他の腐食性洗浄剤が含まれるが、これらに限らない。
- ・包装(真空保護ラップ)に穴があかないように、保管および取り扱いには注意すること。
- ・本品は慎重に取り扱うこと。運搬等において、本品に外的な力が加わらないように積載、保管すること。
- ・給水バッグは、水を貯蔵したまま、長期間保存や持ち運びをしないこと。
- ・本品の保管場所がすぐに分かるように、必要に応じて標識で明示するなどしておくこと。
- ・縦置きにしないこと。
- ・使用期限が切れた製品を使用しないこと。使用期限をメモするなどして、すぐに分かるようにしておくこと。(外箱やかんたんガ

イドの記載欄を活用すること。)

- ・真空保護パックなどに異常がないか、定期的(月1回を目安)に確認すること。
- ・使用開始時まで真空保護パックを開封しないこと。
- ・氷嚢など所定のもの以外をキャリーバッグに入れないこと。
- ・鋭利な形状の物を入れないこと。
- ・正しい方法でキャリーバッグは折りたたむこと。また、正しい位置に収納すること。

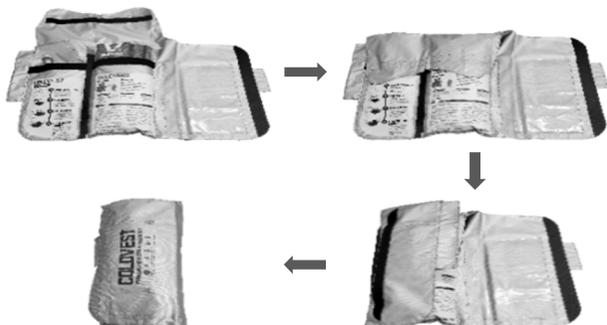

- ・折りたたむ際、チューブやコネクタが潰れたり破損したりしないように注意して正しい位置で折りたたむこと。
- ・本品の重量に注意し、あまり高いところに吊り下げないこと。
- ・キャリーバッグのベルトは、持ち運びがしやすいように適切な長さに調整すること。調整した後はしっかりとベルトを面ファスナーで固定すること。

■ 廃棄方法

- ・本品の使用後や廃棄する際、本品を巻いたり、折り畳んだりすると、エアメントから冷却媒体が漏れ出すおそれがあるので注意すること。
- ・本品を廃棄する場合、内部の水等は取り除かずそのまま廃棄すること。
- ・本品は使い捨てであり、使用後は汚染に注意し、各施設の基準や各自治体の規定に従い安全な方法で廃棄すること。

■ お問い合わせ先

株式会社パルメディカル
 東京都江東区石島2番14号
 TEL 03-6458-6845
 (商品に関する問い合わせ: 03-6458-6847)
 URL: <https://www.palmedical.co.jp/>

*当社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただきます。個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供はいたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡下さい。

■ 参考 (ケアマーク)

製品に表示されているマークは下表のとおりです。

	水を追加してください。 30L(100 fl oz)		子供の手の届かないところに保管してください。
	直射日光を避けて保管してください。		湿度10%~75%で保管してください。
	5℃~45℃の間で保管してください。	1	単回使用. 再使用しないでください。
	火気にさらさないでください。		ここから破いてください。