


COLDVEST® かんたんガイド


- ・つぎの手順で使用してください。
- ・本書は取扱説明書とともに大切に保管してください。

1. 準備

コールドベスト

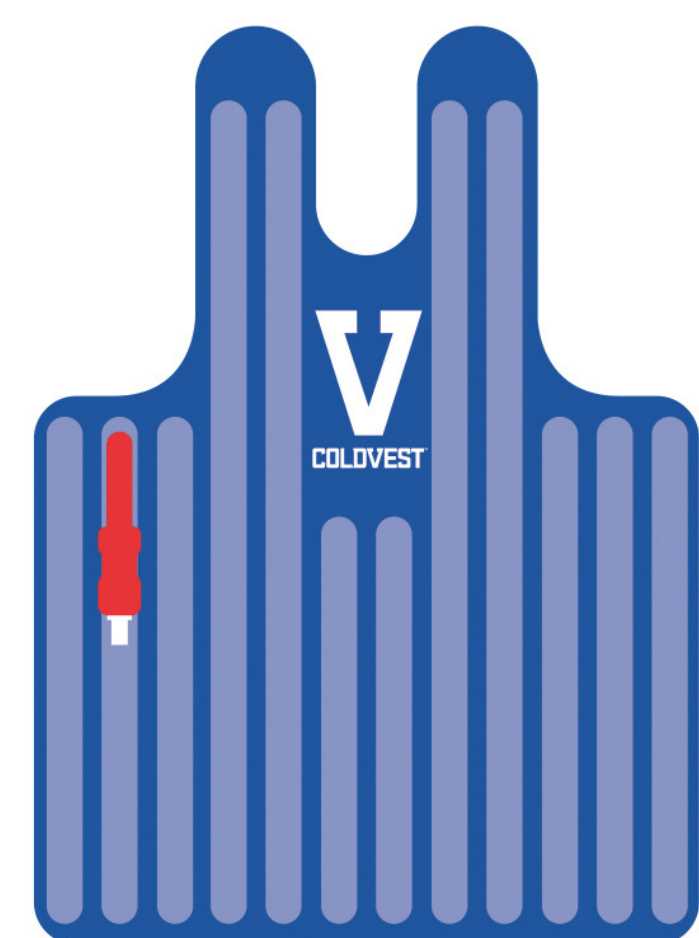

給水バッグ

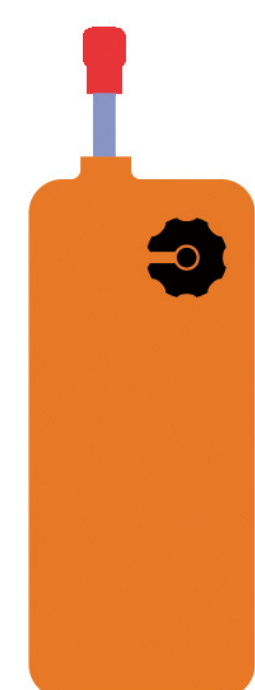


3 Lの水



2. 給水

- 給水バッグに3リットルの水を入れる

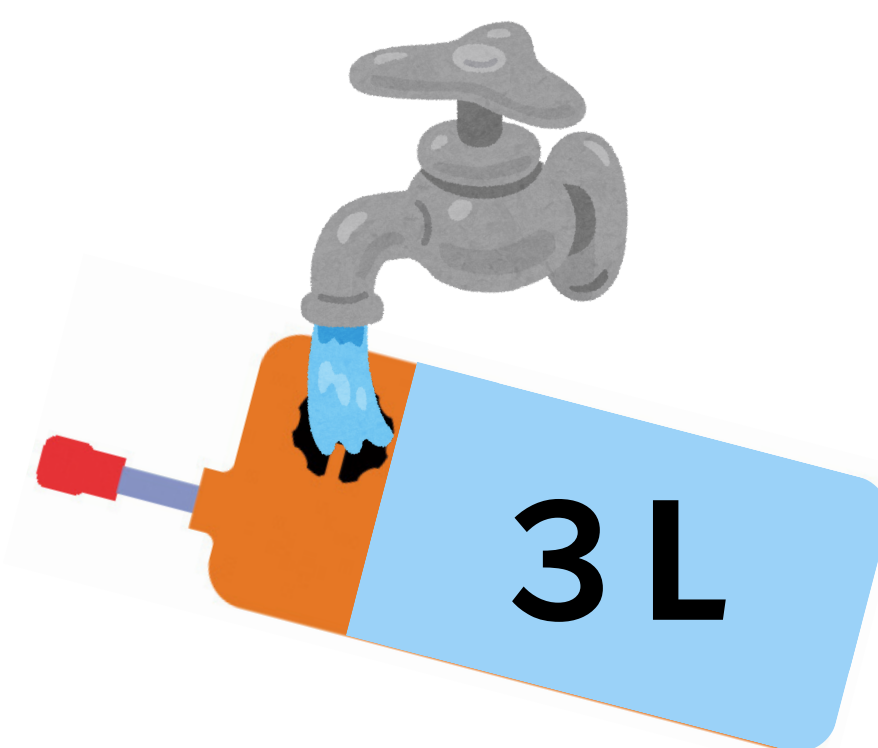

- ベストと水の入った給水バッグをつなげる


- ① ベストの赤色コネクタと給水バッグの赤色コネクタをつなげます。
- ② 抜けないか確認してください。



- ベスト内に3リットルの水を全て入れる
＊給水バッグを**巻きながら**押し入れてください。




- 給水バッグを取り外す

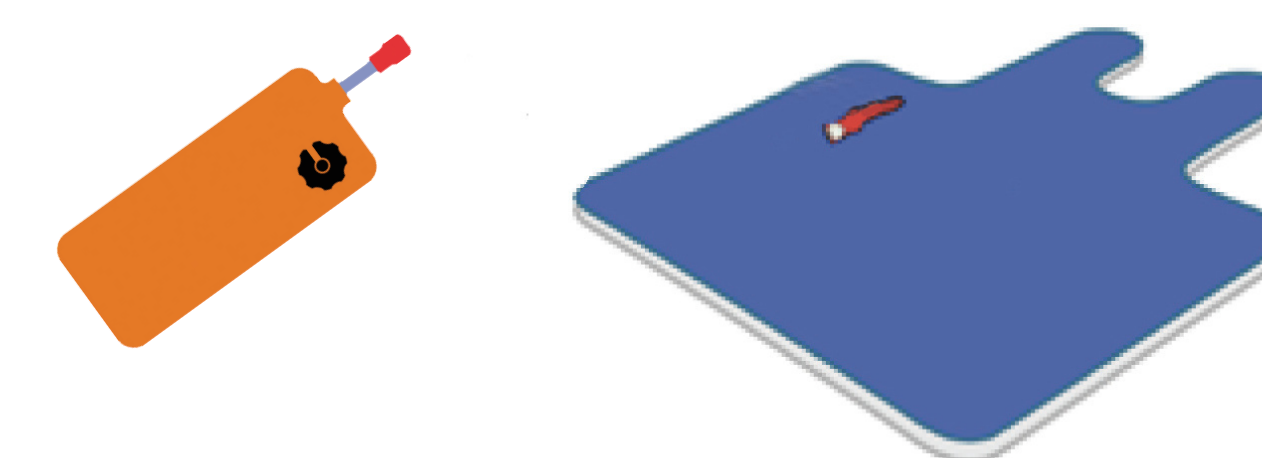


3. 使用

- 水が**全体に行き渡る**ように大きく振る
＊振る・ひっくり返す・もむ等してください。

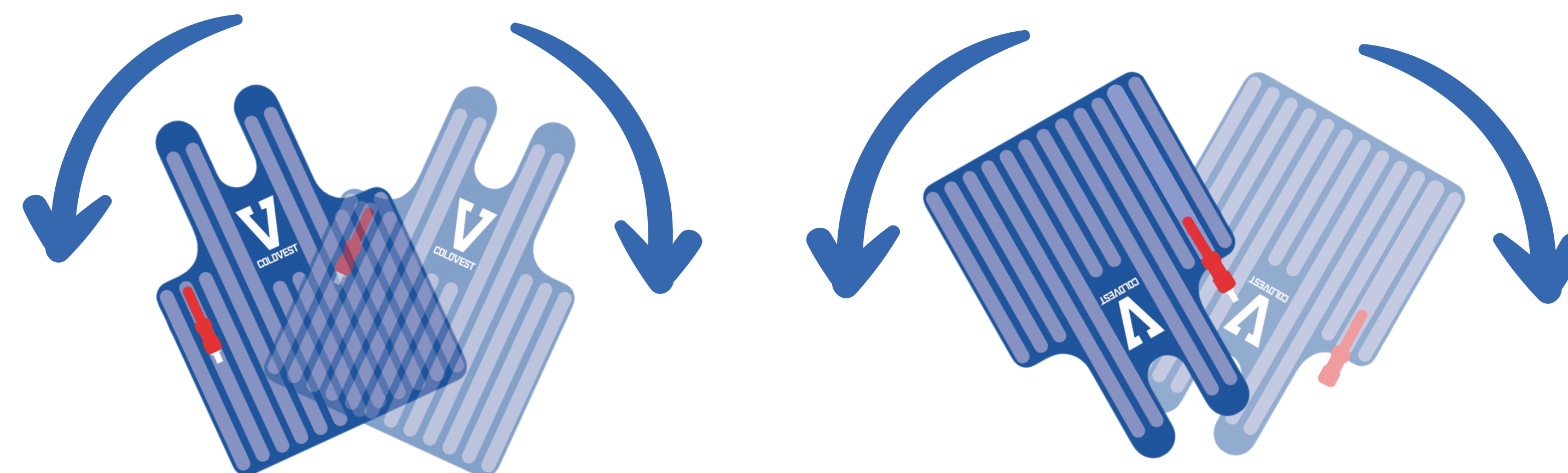

- 広範囲を冷やせるように**広げて密着**させる
＊できるだけ薄着にしてください。
（素肌に直接あてる方が効果的です）
＊青い面が外側です。

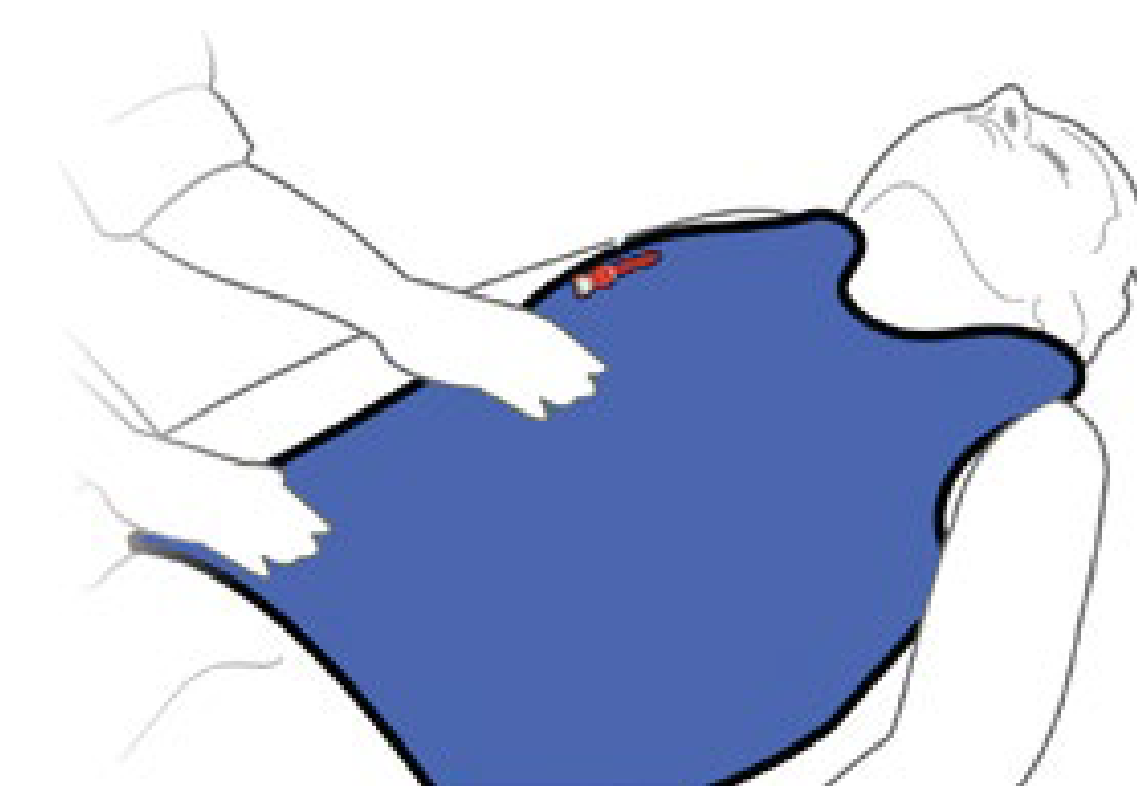

使用上の注意

まず、救急車の手配をしてください。

- ・使用前に必ず取扱説明書を確認しておいてください。
- ・使用を始めるまでは、個包装袋を開けないでください。
- ・必ず規定量の**3リットル**を注水してください。少ないと冷却効果が弱まり、多いと液漏れが生じます。
- ・注水する水は、温水より**冷水を推奨**します。
- ・**アルコール**や、海水などの**塩分濃度が高い液体**は使用しないでください。
- ・コールドベストをご使用の際は、**白地部分を胸部に密着させるように装着してください。**
- ・連続使用時間は、冷却を維持できる**最長1時間**までにしてください。
- ・開封時は製品や個包装、乾燥剤に破損、汚損がないか確認してください。

破損等の異常が認められる場合は使用せず廃棄してください。開封後はすぐに使用してください。

- ・ベスト全体に水が**均等に行き渡るようにしてください。**
- ・ベストには、**尿素や塩化アンモニウム**が入っています。
- ・使用後、穴あきや液漏れがあった場合は、汚染箇所を**多量の水で洗い流し、直ちに廃棄してください。**
- ・**使用期限が切れた製品を使用しないでください。**使用期限をメモするなどして、すぐに分かるようにしておいてください。
(外箱や「かんたんガイド」の記載欄を活用してください。)
- ・この製品を取り外す際は、**肌を傷つけないようご注意ください。**

使用期限： **年** **月** **日**

■輸入販売業者



株式会社パルメディカル

(商品に関する問い合わせ：TEL 03-6458-6847)

COL_I2507A_01_01