

顎関節脱臼再発防止 顎外固定装置

# AGO キャップ<sup>TM</sup>

AGOキャップ(アゴキャップ)は  
顎関節脱臼再発防止のために開発された  
ひとりでも簡単に着脱できる顎外固定装置です。



# AGO キャップ™

## 使用目的

- 急性・習慣性・陳旧性顎関節脱臼整復後の再脱臼防止。
- 顎骨骨折の際の顎外固定など。

## 特長

### 固定が確実で外れにくい

- ・下顎から頭部の形態に合わせた伸縮性の高い素材を使用することにより固定を確実にして開口を制限します。
- ・頭部には伸縮性ネットを使用しているため装着後も外れにくい構造です。

### 開口域の調整が可能・高い牽引力の維持

- ・二重伸縮性バンドで開口域の調整ができます。
- ・オトガイ下にテンションゲージを掛け牽引力を測定することができます。
- ・内側牽引バンドで約500g、外側牽引バンドで約2,000gの牽引力があります。

### 使用が容易

- ・ひとりでも装着が可能です。
- ・装着下でも摂食が可能です。
- ・S・M・L 3種類から適正なサイズを選択頂けます。

### 清潔

- ・中性洗剤による洗濯が可能です。
- ・血液・体液などの付着をわかりやすくする為に、装置は白色を基調としています。

## 装着方法



1 外側の牽引バンドを外します。



2 後ろ側(サイズマーク側)から被ります。



3 頭部とオトガイ部にフィットさせます。



4 耳穴から耳介を出します。



5 外側の牽引バンドを面ファスナーで止めます。



6 吊り秤で牽引力を測定・調整します。



7 固定位置をきめ油性マジック等で印を付けます。



| 製品名          | 型式    | 入数 | 共通商品コード (JAN) |
|--------------|-------|----|---------------|
| AGOキャップ Sサイズ | IAP-S | 1個 | 4580167169711 |
| AGOキャップ Mサイズ | IAP-M | 1個 | 4580167169728 |
| AGOキャップ Lサイズ | IAP-L | 1個 | 4580167169735 |

(関連する診療報酬)

歯科 処置料 I017-3

歯科 手術料 J077

顎外固定

2. 困難なもの

1,500点

顎関節脱臼非観血的整復術(片側) 800点

医療機器届出番号：13B1X00065000026

■製造販売業者

株式会社パルメディカル

〒135-0014

東京都江東区石島 2-14 Imas Riverside 3F-C

TEL 03-6458-6845 FAX 03-6458-6574

<https://www.palmedical.co.jp/>

■支店：広島札幌 ■営業所：福岡大阪帯広 ■工場：群馬

(商品に関する問い合わせ：TEL 03-6458-6847)